



LINEA

orione®

Articolo

4110



Categoria commerciale

## SUPPORTO SOTTOROTULEO

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

POLIAMMIDE

72%

POLIESTERE

28%

100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

COLORE / COLOUR

TAGLIA UNICA  
ONE SIZE

Lavaggio



Lavare a mano.

Lavare con un ciclo  
normale a una  
temperatura massima di  
30 °C.

Do not dry



Non lavare a secco.


Il capo non può essere  
trattato con candeggina,  
lavato solo con detersivo per  
colorati o per delicati.

Non stirare.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo.

Astuccio

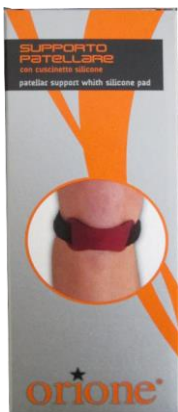

Modalità di applicazione

Separare completamente i cinghietti di regolazione. Il cuscinetto interno ed il supporto stesso che sono a lieve forma di "V" devono essere posizionati come da illustrazione ( "V" verso l'alto ). Posizionare il supporto sulla gamba. Il cuscinetto interno deve essere appena sotto la rotula. Con il ginocchio in flessione ( utilizzatore seduto ) tendere i due cinghietti di fissaggio sino ad ottenere la compressione richiesta, assicurandosi che il supporto sia perfettamente centrato sul ginocchio. Provare a camminare e se la compressione è eccessiva regolare i cinghietti.



Indicazioni

Ove occorre supporto  
sottorotuleo. Morbo  
di Osgood-Schlatter

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.