

Articolo

3056



Categoria commerciale

FASCIA PER STOMIZZATI

Colore di vendita

GRIGIO

Comp. Tessile

COTONE	38%
POLIAMMIDE	25%
NYLON	17%
POLIESTERE	10%
GOMMA	10%
	100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE		COLORE / COLOUR				
S	67-76	L	87-96	XXL	107-116	■
M	77-86	XL	97-106	XXXL	117-126	

Lavaggio

Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Stirare con il ferro non caldo, ossia fino a una temperatura massima di 110 °C, preferibilmente senza vapore.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.


Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio



Modalità di applicazione

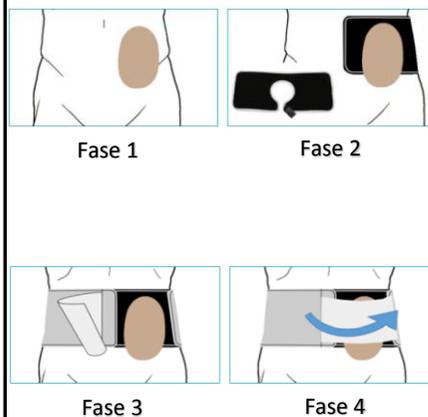

Indicazioni

Pazienti stomizzati, aiuta a prevenire formazioni di ernie stomali.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.