



LINEA

orione®

Articolo

3091



Categoria commerciale

FASCE POST-OPERATORIE

Colore di vendita

BIANCO

Comp. Tessile

POLIESTERE	57%
POLIAMMIDE	25%
GOMMA	18%
	100%



Taglie di vendita

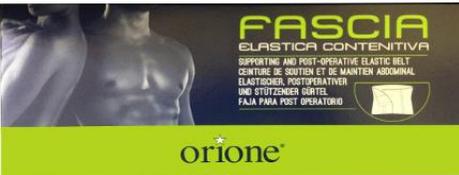
TAGLIE / SIZE					COLORE / COLOUR				
	S	65-74		L	85-94		XXL	105-114	
	M	75-84		XL	95-104		XXXL	115-134	

Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio	Modalità di applicazione	Indicazioni	Avvertenze
	<p>Aprire completamente la fascia, posizionarla all'altezza della vita, richiudere la fascia su se stessa tramite la chiusura velcra.</p>	<p>In campo medico-chirurgico, alle necessità di coloro che hanno subito interventi chirurgici e devono indossare fasce contenitive a tensione differenziata, regolabili ed anatomiche. Sono raccomandate anche come cinture post-parto.</p>	<p>Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.</p>
	<p>Caratteristiche</p> <p>Altezza cm 28 Tessuto a 3 strisce</p>		