



Articolo

Colore di vendita
BIANCO

Comp. Tessile
POLIAMMIDE 82%
ELASTAM 18%

100%

Lavaggio

Le calze non devono essere asciugate ad una temperatura superiore a 125° e per tempo massimo di 20 minuti.

Modalità di applicazione

1) Inserire la mano nella calza, e tenendo il tallone fra pollice e l'indice rivoltare la calza. 2) Inserire il piede nella calza e posizionare bene il tallone. 3) Utilizzando le mani, far scorrere la calza lungo la gamba, senza tirare eccessivamente. 4) Eliminare eventuali pieghe, ripartendo la maglia lungo la gamba.

Indicazioni

Profilassi anti-trombo-embolica. Nel pre-post operatorio e nei pazienti costretti a letto.

Avvertenze


Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico per scelta del modello, taglia, modo di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al personale medico.



Categoria commerciale

CALZE ANTI TROMBO

Lavaggio

	Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 30 °C.
	Non stirare.
	Il capo non può essere trattato con candeggina.
	L'indumento può essere pulito con solventi percloroetilene, idrocarburi, R113 ed R11.

Taglie di vendita

GAMBALETTO	REGULAR	S-M-L-XL
COSCIA	SHORT-REGULAR-LONG	S-M-L-XL-XXL
MONOCOLLANT	REGULAR-LONG	S-M-L-XL-XXL

TABELLA IDENTIFICAZIONE TAGLIE

1) Misurare la circonferenza della coscia nel punto G.
- Se la misura è inferiore a 63 cm selezionare le taglie S - M - L
- Se la misura è compresa fra 63 cm e 81 cm si consiglia di utilizzare la taglia XL nei modelli calza coscia e monocollant con cintura.
- Se la misura è superiore a 81 cm utilizzare unicamente il gambaletto.

CALZA COSCIA

2) Misurare la circonferenza del polpaccio nel punto C per determinare la taglia finale.
3) Misurare la distanza dal tallone all'inguine, per determinare la lunghezza.

MONOCOLLANT CON CINTURA

2) Misurare la circonferenza del polpaccio nel punto C per determinare la taglia finale.
3) Misurare la distanza dal tallone all'inguine, per determinare la lunghezza.

GAMBALETTO

2) Misurare la circonferenza del polpaccio nel punto C per determinare la taglia finale.
3) Misurare la distanza dal tallone fino a dietro il ginocchio, per determinare la lunghezza.

Astuccio



CIRCONFERENZA B CAVALLIA	CIRCONFERENZA G COSCIA	CIRCONFERENZA C POLPACCIO	LUNGHEZZA GAMBA (CM)	TAGLIA	CODICE
DA 18 A 21 CM	INFERIORE A 63 CM	FINO A 31 CM	FINO A 74	S-SHT	00041
			DA 74 A 80	S-REG	00051
			DA 80 IN POI	S-LNG	00061
DA 20 A 23 CM	INFERIORE A 63 CM	DA 31 A 36 CM	FINO A 74	M-SHT	00042
			DA 74 A 80	M-REG	00052
			DA 80 IN POI	M-LNG	00062
DA 22 A 25 CM	INFERIORE A 63 CM	DA 36 A 42 CM	FINO A 74	L-SHT	00043
			DA 74 A 80	L-REG	00053
			DA 80 IN POI	L-LNG	00063
DA 24 A 27 CM	DA 63 A 81 CM	SUP A 38 CM	FINO A 72	XL-REG	00054
			SUP A 72	XL-LNG	00064

CIRCONFERENZA B CAVALLIA	CIRCONFERENZA G COSCIA	CIRCONFERENZA C POLPACCIO	LUNGHEZZA GAMBA (CM)	TAGLIA	CODICE
DA 18 A 21 CM	INFERIORE A 63 CM	FINO A 31 CM	FINO A 74	S-REG	00085
			SUP. A 74	S-LNG	00095
DA 20 A 23 CM	INFERIORE A 63 CM	DA 31 A 36 CM	FINO A 74	M-REG	00086
			SUP. A 74	M-LNG	00096
DA 22 A 25 CM	INFERIORE A 63 CM	DA 36 A 42 CM	FINO A 74	L-REG	00087
			SUP. A 74	L-LNG	00097
DA 24 A 27 CM	DA 63 A 81 CM	SUP. A 38 CM	FINO A 74	XL-REG	00088
			SUP. A 74	XL-LNG	00098

CIRCONFERENZA B CAVALLIA	CIRCONFERENZA C POLPACCIO	LUNGHEZZA GAMBA (CM)	TAGLIA	CODICE
DA 18 A 21 CM	FINO A 31 CM	FINO A 41	S-REG	00021
DA 20 A 23 CM	FINO A 43 CM	FINO A 43	M-REG	00022
DA 22 A 25 CM	FINO A 46 CM	FINO A 46	L-REG	00023
DA 24 A 27 CM	FINO A 46 CM	FINO A 46	XL-REG	00024