

Articolo

316



Categoria commerciale

SLIP PER ERNIA

Colore di vendita

BIANCO

GRIGIO

Comp. Tessile

POLIAMMIDE 54%

COTONE 32%

GOMMA 14%

100%



Taglie di vendita



TAGLIE/SIZE

1°	71-75	3°	81-85	5°	91-95	7°	101-105	9°	111-115
2°	76-80	4°	86-90	6°	96-100	8°	106-110	10°	116-120

COLORE / COLOUR



Lavaggio



Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Stirare con il ferro non caldo, ossia fino a una temperatura massima di 110 °C, preferibilmente senza vapore.



Non lavare a secco.



Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio


Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio + accessori

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze

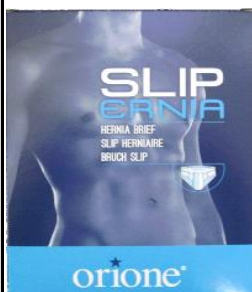

Cuscinetti compressivi inclusi nella confezione



Indossare come un normale slip. Accertarsi del corretto posizionamento dei cuscinetti compressivi.

» Contenzione di ernie inguinali riducibili.  
 » Postoperatori di interventi di ernia inguinale prevengono notevolmente l'eventuale recidiva', accelerano nell'intervento "free tension" la formazione di tessuto cicatriziale riducendo notevolmente i tempi per una normale ripresa dell'attività'.  
 » Aiutano nella riduzione del dolore post-operatorio.  
 » Preventivi nelle attività lavorative e sportive.

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.