

Articolo

504



Categoria commerciale

SLIP ELASTICO CONTENITIVO DONNA

Colore di vendita

NUDO

Comp. Tessile

COTONE 86%

ELASTAN 14%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE		COLORE / COLOUR	
2°	65-69	4°	75-79
3°	70-74	5°	80-84
		6°	85-89
		7°	90-94

Lavaggio

Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Stirare con il ferro non caldo, ossia fino a una temperatura massima di 110 °C, preferibilmente senza vapore.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio

Modalità di applicazione

Indicazioni

Avvertenze



Indossare come un normale slip.

Particolarmente indicati nelle ptosi gastriche o renali e come post-parto. Aiuta a riequilibrare i muscoli addominali e la massa intestinale, restituendo forma fisica.

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.