

Articolo

508


Categoria commerciale

SLIP ELASTICI CONTENITIVI

Colore di vendita

GRIGIO

ANTRACITE

Comp. Tessile

COTONE

88%

ELASTAN

12%

100%



Taglie di vendita



TAGLIE / SIZE

| | | | | | | | |
|----|-------|----|-------|----|---------|----|---------|
| 2° | 76-80 | 4° | 86-90 | 6° | 96-100 | 8° | 106-110 |
| 3° | 81-85 | 5° | 91-95 | 7° | 101-105 | | |

COLORE / COLOUR



Lavaggio



Lavare con un ciclo normale a una temperatura massima di 40 °C.



Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.



Stirare con il ferro non caldo, ossia fino a una temperatura massima di 110 °C, preferibilmente senza vapore.



Non lavare a secco.




Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio

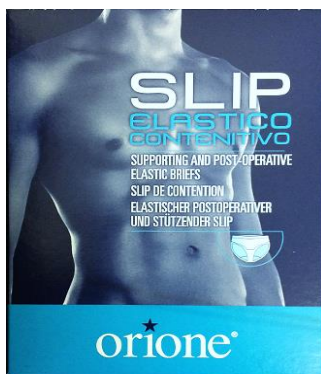

Modalità di applicazione

Indossare come un normale slip.

Indicazioni

Particolarmente indicati per rilassamenti addominali. Come coadiuvante nei postumi di interventi addominali ed inguinali. Coadiuvante come prevenzione e sostegno durante l'attività sportiva. Sostengono senza comprimere.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.