

NOME PRODOTTO:

Copertura per ortesi e gessi in misura per adulti – gamba lungo

REFERENZA:

OSL4480

TAGLIA:

SIZE	AROUND THE LEG	 108 cm
ONE SIZE FITS ALL	Min.: 27 cm Max.: 70 cm	

IMMAGINE PRODOTTO:**FABBRICANTE:**

ORLIMAN, S.L.U. CIF: B-96122510
C/ AUSIAS MARCH Nº 3. POLÍGONO INDUSTRIAL LA POBLA – L'ELIANA.
46185 LA POBLA DE VALLBONA – VALENCIA – SPAIN
SPANISH MEDICAL DEVICE OPERATION LICENCE NUMBER: 20-PS

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO (secondo il Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici 2017/745):

CLASSE: I – Allegato VIII, Regola 1

Tipologia di fabbricazione: Dispositivo prodotto in serie

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Copertura protettiva ermetica per plantari e cerotti. Realizzata in materiale impermeabile e flessibile per facilitare il bagno o la doccia. Riutilizzabile.
- Il meccanismo autosigillante si adatta a bracci di diverse dimensioni. Presenta un design anatomico per un utilizzo comodo e sicuro.
- **Colore:** Semitrasparente

INDICAZIONI:

- Aiuta a prevenire infezioni e ritardi nel recupero dovuti al contatto con l'acqua.
- Evita la necessità di sostituire il gesso a causa di danni provocati dal contatto con l'acqua.

MATERIALI:

ALLERGENI: Non contiene lattice.
MATERIALI FERROMAGNETICI: Non presenti.
BIOCIDI: Non presenti.

Composizione:

- Copertura: PVC
- Sistema autosigillante: Silicone.

RACCOMANDAZIONI PRODOTTO:

Quando non si utilizza il prodotto, conservarlo nella confezione originale in un luogo asciutto a temperatura ambiente. Per asciugare il prodotto, utilizzare un asciugamano asciutto per assorbire quanta più umidità possibile e lasciarlo asciugare a temperatura ambiente. Non appendere né stirare il prodotto e non esporlo a fonti di calore dirette come fornelli, asciugatrici, luce solare diretta, ecc. Durante l'utilizzo o la pulizia del prodotto, non utilizzare sostanze abrasive o corrosive, alcol, unguenti o solventi liquidi. Se non asciugati correttamente, i residui di detergente possono irritare la pelle e causare il deterioramento del prodotto.

**RACCOMANDAZIONI-AVVERTENZE:**

L'uso di questi prodotti è condizionato dalle indicazioni. Sebbene il prodotto non sia definito come dispositivo monouso, se ne raccomanda l'utilizzo su un solo paziente e solo per gli scopi previsti, come descritto in queste istruzioni o da un operatore sanitario.

Per lo smaltimento del prodotto e del suo imballaggio, è necessario attenersi scrupolosamente alle normative vigenti nella propria zona. Questo articolo è resistente all'acqua. Tuttavia, se ne sconsiglia l'uso per attività che richiedono immersione, come nuoto e immersioni subacquee.

Per evitare problemi di circolazione sanguigna, limitare la durata di utilizzo e assicurarsi che il prodotto non sia troppo stretto. Pericolo di asfissia. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo.

Non esporre il prodotto alla luce solare o ad altre fonti di calore o fiamme.

Asciugare la parte superiore dell'anello prima di rimuovere il prodotto.

Non utilizzare oggetti appuntiti durante la manipolazione, come ad esempio orecchini o anelli.

Se si utilizza con un cerotto, assicurarsi che i bordi ruvidi non siano a contatto con il prodotto, poiché potrebbero danneggiarlo.

Prestare particolare attenzione alle superfici umide, scivolose e bagnate: non camminare né appoggiarsi su di esse.

Non riutilizzare se l'interno della protezione è sporco o danneggiato.

Il materiale plastico potrebbe provocare una sensazione di calore.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Garanzia: 6 mesi.